

Leeskaart



Volg deze eenvoudige regels en gebruik deze kaart als richtlijn om te ontdekken wat de geschikte sterkte is voor uw leesbril

1. DRUK DEZE PAGINA AF OP EEN A4-TJE
2. HOUD HET PAPIER ONGEVEER 36CM VAN UW OGEN
3. BEGIN BOVENAAN EN GA REGEL VOOR REGEL NAAR DE ONDERKANT VAN DE KAART
4. DE EERSTE REGEL DIE U KUNT LEZEN GEEFT AAN WELKE STERKTE GESCHIKT IS VOOR U

Als u dit duidelijk kunt lezen kiest u +1,00
Als u dit duidelijk kunt lezen kiest u +1,50
Als u dit duidelijk kunt lezen kiest u +2,00
Als u dit duidelijk kunt lezen kiest u +2,50
Als u dit duidelijk kunt lezen kiest u +3,00
Als u dit duidelijk kunt lezen kiest u +3,50
Als u dit duidelijk kunt lezen kiest u +4,00
Als u dit duidelijk kunt lezen kiest u +4,50

* *

Aleen voor dichtbij en voor lezen, niet om te rijden, machines te bedienen, in de verte te kijken of om als oogbescherming te gebruiken.
Een professioneel oogonderzoek kan uw visuele behoefte en de gezondheid van uw ogen bepalen